

Overige weefsels

Document type:	Laboratoriumgids / LG	Document subtype:	.
Doelgroep:	Labo PO	Subdoelgroep:	.
Auteur:	Elke Wevers	Keurder:	Karen Deraedt
Geldig van:	29/12/2020	Geldig tot:	29/12/2023
Document-nr:	PO-LG4-0028	Versie-nr:	3.0
Campus:	Alle	Bekrachtiger	Peter Van Eyken

Betreft alle weefsels die niet apart worden vermeld in de inhoudstabel van de staalafname instructies: biopsie en partiële of totale resectie van organen zoals schildklier, blaas, prostaat, nier, testis, uterus, adnex, dundarm, colon, long, enz.

1. Type aanvraagformulier

- Aanvraagformulier voor histologisch onderzoek.

2. Uitvoerfrequentie

- Dit onderzoek wordt éénmaal per dag uitgevoerd (uitgezonderd weekend en feestdagen).

3. Antwoordtijd

- De tijd tussen ontvangst van het staal en het verslag is oa. afhankelijk van de complexiteit van de pathologie en duurt 5-7 werkdagen.
- Bij nood aan bijkomende analyses en overleg kan de antwoordtijd oplopen.

4. Afname instructies

- Conform de richtlijnen van de dienst Pathologische Ontleedkunde.
- Fixatief: 4% gebufferde formaldehyde. Let er op een voldoende groot recipiënt te gebruiken en het weefsel volledig onder te dompelen in een voldoende hoeveelheid formol.
- Type recipiënt: 60 ml potje met blauwe schroefdop, potje van 250-750 ml, emmer van 2500 ml, enz. afhankelijk van de grootte van het specimen.
- Onmiddellijk fixeren.

5. Transport

- Voor richtlijnen over transport zie: Transport van het staal

6. Methode

- Na fixatie worden de stalen verwerkt tot een paraffineblok, waarvan coupes van 3-4 µm dik gesneden worden en gekleurd.

Revisie overzicht

dd-mm-jjjj	Creatie document	V. Naam
------------	------------------	---------